


IG 1700  
MASSAGESESSEL  
Bedienungsanleitung

Bitte die Bedienungsanleitung aufheben!

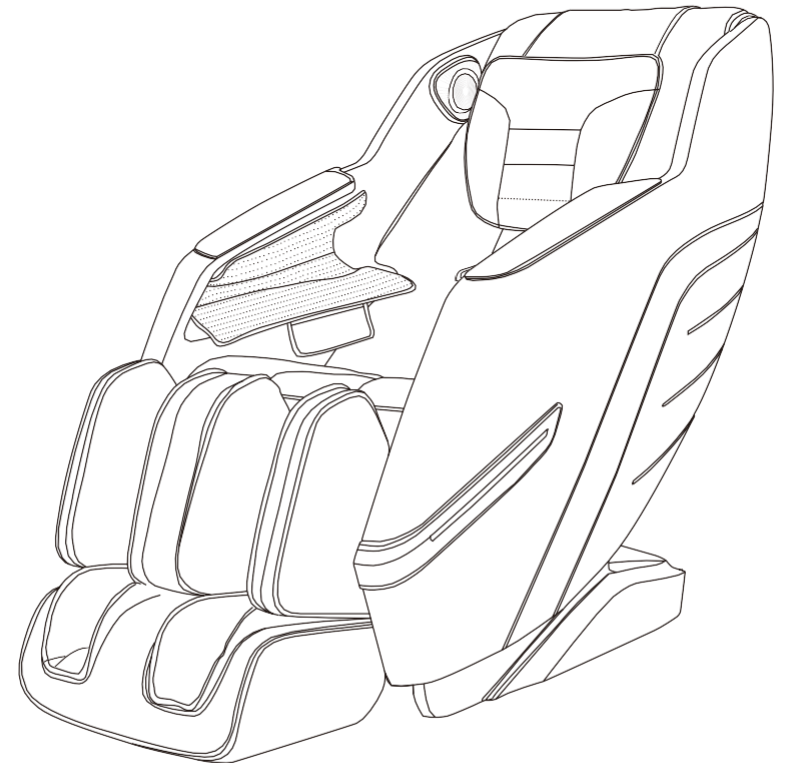

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um zu wissen, wie Sie dieses Produkt korrekt bedienen, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Bitte achten Sie besonders auf einige wichtige Sicherheitshinweise und bewahren Sie dieses Handbuch ordnungsgemäß für die zukünftige Nutzung auf.

**Hinweis:** Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Design des Produkts zu ändern und zu verbessern. Sollten Unterschiede zwischen den im Handel befindlichen Produkten und der Beschreibung in diesem Handbuch bestehen, ist dies ein normaler Vorgang. Unser Unternehmen wird Sie darüber nicht gesondert informieren. Maßgeblich sind die tatsächlichen Produkteigenschaften und Farben.

## INHALT

### Vor der Benutzung

---

Sicherheitshinweise _____	02-04
Installationsteile _____	05
Aufstellen des Massagesessels _____	06-07
Vor der Benutzung _____	08-09
Produktstruktur _____	10-13

### Verwendungsmethode

---

Bedienungsanleitung .....	14-16
---------------------------	-------

### Wartung

---

Reinigung und Pflege .....	18
----------------------------	----



### Wichtig

---


Fehlerbehebung .....	19-20
Produktspezifikationen .....	21

## Sicherheitsvorkehrungen (müssen beachtet werden)


- Bitte lesen Sie alle relevanten Anweisungen sorgfältig vor der Verwendung.
- Die hier aufgeführten Hinweise helfen Ihnen, das Produkt sicher und korrekt zu verwenden.
- Um den Grad der Gefährdung und Schäden klar anzugeben, werden Vorsichtsmaßnahmen in „**Warnung**“ und „**Vorsicht**“ unterteilt, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht werden können. Beide sind wichtig für die Sicherheit und müssen befolgt werden.

 <b>Warnung</b>	Weist darauf hin, dass durch unsachgemäße Verwendung schwere Verletzungen oder Tod auftreten können.
 <b>Vorsicht</b>	Weist darauf hin, dass durch unsachgemäße Verwendung leichte Verletzungen oder Sachschäden auftreten können.




- Bitte beachten Sie das jeweilige Symbol vor jedem Sicherheitshinweis.

 <b>Verboten</b>	Absolute Untersagung.
---	-----------------------

### Folgende Personengruppen dürfen dieses Produkt nicht verwenden:

 Verboten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, sensorischen oder neurologischen Beeinträchtigungen oder mangelnder Erfahrung nur unter Aufsicht und Anleitung einer verantwortlichen Person benutzt werden. Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen.</li> <li>■ Patienten mit Osteoporose.</li> <li>■ Patienten mit Herzkrankheiten oder implantierten elektronischen Geräten wie Herzschrittmachern.</li> <li>■ Personen mit Fieber.</li> <li>■ Schwangere Frauen oder Frauen während ihrer Menstruation.</li> <li>■ Patienten mit Verletzungen oder Hautkrankheiten.</li> <li>■ Unbeaufsichtigte Kinder unter 14 Jahren sowie bewusstlose Personen dürfen dieses Produkt nicht verwenden.</li> <li>■ Personen, denen ärztlich Ruhe verordnet wurde oder die sich unwohl fühlen.</li> <li>■ Personen, deren Körper geschwächt ist.</li> <li>■ Personen, die überempfindlich gegenüber Hitze sind, müssen besonders aufmerksam sein.</li> <li>■ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren durch den Hersteller, eine Wartungsabteilung oder eine ähnliche qualifizierte Stelle ersetzt werden.</li> </ul>
---	---

## Sicherheitsvorkehrungen (müssen beachtet werden)

Wichtige Sicherheitshinweise	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kinder dürfen keine beweglichen Teile dieses Produkts berühren.</li> <li>■ Nur ein ordnungsgemäß, geeignetes, geerdetes Netzkabel verwenden.</li> <li>■ Immer den Stecker nach Gebrauch oder vor der Reinigung ziehen.</li> <li>■ Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Handbuch beschrieben.</li> <li>■ Verwenden Sie keine nicht empfohlenen Teile oder Zubehörteile.</li> <li>■ Nicht im Freien verwenden.</li> <li>■ Bitte lesen Sie vor dem Betrieb die Bedienungsanleitung sorgfältig.</li> <li>■ Das Produkt niemals f. a. als die hier beschriebenen Zwecke verwenden.</li> <li>■ Eine Nutzungsdauer von 20 Minuten wird empfohlen.</li> <li>■ Nicht verwenden, wenn der Bezug oder das Leder beschädigt sind.</li> <li>■ Keine Gegenstände in das Gerät fallen lassen.</li> <li>■ Nicht einschlafen, während das Gerät in Betrieb ist.</li> <li>■ Nicht verwenden, wenn Alkohol konsumiert wurde o. Sie sich unwohl fühlen.</li> <li>■ Nicht innerhalb einer Stunde nach einer Mahlzeit verwenden.</li> <li>■ Keine übermäßige Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.</li> </ul>
Sicherheitsvorkehrungen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spannung mit den Spezifikationen des Produkts überprüfen.</li> <li>■ Niemals mit nassen Händen Stecker o. Netzstecker ziehen.</li> <li>■ Kein Wasser ins Produkt gelangen lassen (Achtung Stromschlag).</li> <li>■ Ziehen Sie das Netzkabel nicht mit Gewalt – dies kann es beschädigen.</li> <li>■ Ändern oder reparieren Sie die Schaltung des Produkts nicht selbst.</li> <li>■ Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.</li> <li>■ Halten Sie sich von dem Gerät fern, wenn ein Stromausfall auftritt, um Verletzungen zu vermeiden, falls es plötzlich wieder startet.</li> <li>■ Stellen Sie die Nutzung sofort ein, wenn das Gerät abnormal arbeitet, und wenden Sie sich an den Kundendienst.</li> <li>■ Stellen Sie die Nutzung ein, wenn Sie sich unwohl fühlen, und konsultieren Sie einen Arzt.</li> </ul>
Lagerbedingungen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lagertemperatur: 5 °C bis 40 °C</li> <li>■ Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %, frei von korrosiven Gasen und in einem gut belüfteten Raum.</li> </ul>

## Sicherheitsvorkehrungen (müssen beachtet werden)

### Produktservice und Wartung

- Dieses Produkt darf nur vom vom Hersteller benannten Servicecenter gewartet werden. Benutzer dürfen es nicht selbst zerlegen oder warten.
- Vergessen Sie nicht, nach Gebrauch den Hauptschalter auszuschalten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Steckdose locker ist.
- Bei längerer Nichtnutzung Kabel aufwickeln und Gerät trocken sowie staubfrei lagern.
- Nicht hoher Temperatur, offenem Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Verdünner, Benzin oder Alkohol.
- Mechanik ist speziell gefertigt, daher keine Wartung nötig.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände an diesem Produkt.
- Rollen oder ziehen Sie das Produkt nicht über unebenen Boden, sondern heben Sie es an, wenn es bewegt werden muss.
- Verwenden Sie das Produkt in Intervallen und nicht über einen langen Zeitraum ununterbrochen.

### Betriebsumgebung

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in sehr feuchter Umgebung, z. B. im Badezimmer.
- Stoppen Sie die Nutzung sofort, wenn sich die Umgebungstemperatur stark verändert.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in sehr staubiger oder aggressiver Umgebung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in engen Räumen ohne ausreichende Belüftung.





### Lösungen bei gewöhnlichen Störungen

- Wenn während des Betriebs Motorgeräusche auftreten, ist dies normal.
- Falls das Gerät nicht funktioniert, prüfen Sie, ob Stecker und Steckdose richtig angeschlossen sind und ob der Netzschalter eingeschaltet ist.
- Nach Ablauf der voreingestellten Betriebszeit schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wenn es zu lange in Betrieb ist, verhindert der Temperaturschutz eine Überhitzung und stoppt das Gerät. Nach einer halben Stunde kann es wieder verwendet werden.

## Installationsteile

### Anleitung zur Wadeninstallation


1. Führen Sie das Kabel der Waden- und Luftleitung in die vordere Buchse des Stahlrahmens ein (Abbildung 1).
2. Schieben Sie dann das verbundene Kabel und das Luftrohr in die Öffnung des Rückenlehnenrahmens (Abbildung 2).
3. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, öffnen Sie die Abdeckungen der Wadenbefestigung auf beiden Seiten des Stahlrahmens (Abbildung 3).
4. Setzen Sie die Wadenstütze in die Aussparung, schließen Sie die Abdeckungen und befestigen Sie sie mit zwei Schrauben (Abbildung 4).

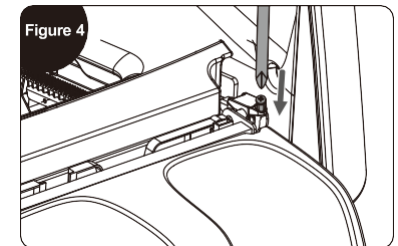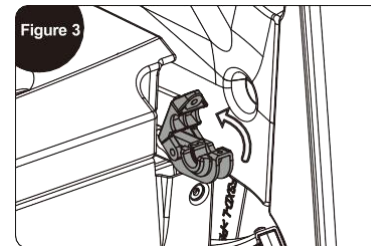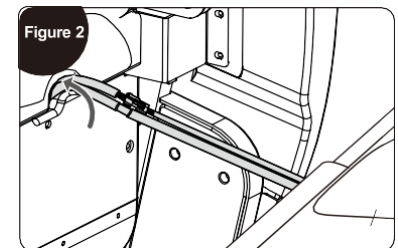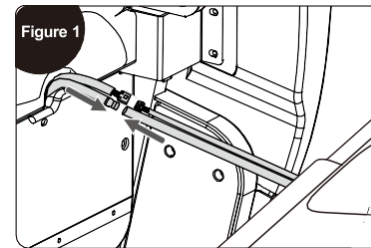

## Massagesessel aufstellen

### Installationsplatzierung


Stellen Sie sicher, dass genügend Platz vorhanden ist, damit der Massagestuhl mindestens 30 cm gekippt werden kann. Setzen Sie den Massagestuhl nicht direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus (z. B. vor Heizgeräten) und stellen Sie ihn an einem Ort auf, der hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung vermeidet. Es wird empfohlen, für den langfristigen Gebrauch ein weiches Kissen an einem bestimmten Standort unterzulegen. Wenn Sie das Kissen auslegen, sollte die Größe ausreichen, um den Bereich abzudecken, in dem das Gerät den Boden berührt, sowie den Bereich, in dem Ihre Füße den Boden berühren.

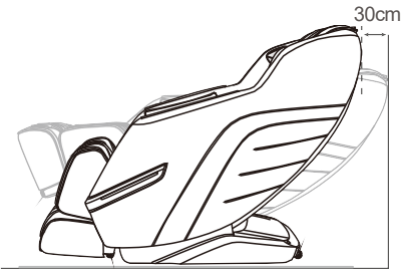

### Anleitung zum Anheben des Massagesessels

Es ist Teamarbeit erforderlich, um den Stuhl anzuheben und zu bewegen, um Verletzungen zu vermeiden.

1. Bitte heben Sie den Massagestuhl an, um ihn auf einem unempfindlichen Untergrund wie Holzfußboden zu bewegen.
2. Wenn Sie auf einem ähnlichen Holzfußboden umziehen, wird empfohlen, den Stuhl anzuheben, um Schäden an den Rollen zu vermeiden. Wenn der Boden angehoben und der Stuhl an den gewünschten Ort bewegt wird, achten Sie darauf, Ihre Hände aus dem Weg zu halten, um Verletzungen zu vermeiden, und achten Sie darauf, dass Ihre Füße nicht gequetscht werden. Lassen Sie den Stuhl erst los, wenn er vollständig steht, da der Boden beschädigt werden könnte. Es wird empfohlen, Matten o. Ä. auf den Boden zu legen.

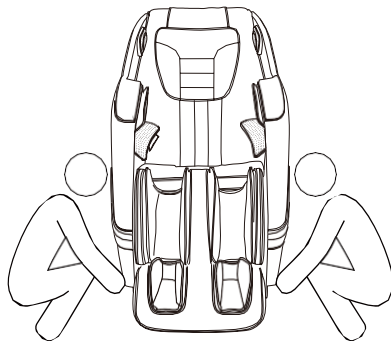


## Massagesessel aufstellen

### Bewegung des Massagesessels

Benutzen Sie die hinteren Rollen, um den Massagestuhl zu bewegen. Neigen Sie den Stuhl, indem Sie ihn nach unten und hinten um ca. 45° kippen, wie in der Abbildung gezeigt.

**HINWEIS:** Übermäßige Kippkraft kann dazu führen, dass der Stuhl vollständig umkippt und das Produkt beschädigt wird.



1. Schalten Sie vor dem Bewegen das Gerät ordnungsgemäß aus, setzen Sie es zurück und trennen Sie es vom Strom.
2. Halten Sie den Stuhl während des Bewegens frei (keine Personen, Haustiere oder Gegenstände darauf).
3. Überqueren Sie beim Bewegen keine Höhenunterschiede von mehr als 2 mm oder Lücken von mehr als 5 mm.
4. Bei Verwendung der Rollen für das Bewegen ist eine durchgehende Bewegung von 1 Sekunde nicht möglich; wenn die Entfernung 50 Meter überschreitet, bewegen Sie das Produkt bitte langsam und gleichmäßig.

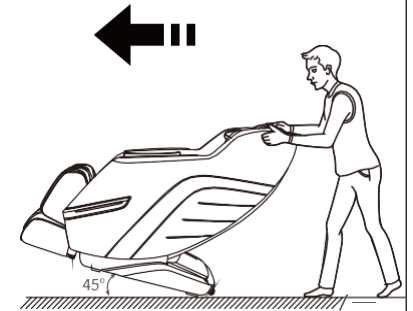

### Wie man Kopf- und Rückenpolster abnimmt und verwendet

Die Verwendung eines Kopfpolsters kann die Intensität der Knetmassage im Nacken- und Schulterbereich verringern.

Sie können selbst entscheiden, ob Sie ein Kopfpolster verwenden möchten (die Verwendung wird empfohlen). Das Rückenpolster und die Rückenlehne sind mit einem Reißverschluss (1) verbunden, das Kopfpolster und das Rückenpolster sind mit einem weiteren Reißverschluss (2) verbunden.

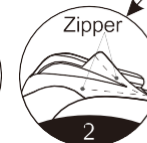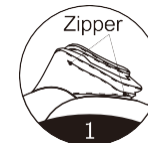

## Vor der Benutzung


### Umgebung prüfen

Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Haustiere oder Gegenstände um das Gerät herum befinden.



### Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper in den Spalten des Geräts befinden

Vor der Massage stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper in den Beinen, Füßen usw. verfangen. Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder Kopf in den Bereich zwischen dem unteren Mechanismus des Geräts und dem Hauptkörper oder in den Bereich zwischen Armlehne und Kapsel eindringen. Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder Kopf unter den Stoff- oder Lederbezug des Massagesitzes gelangen.

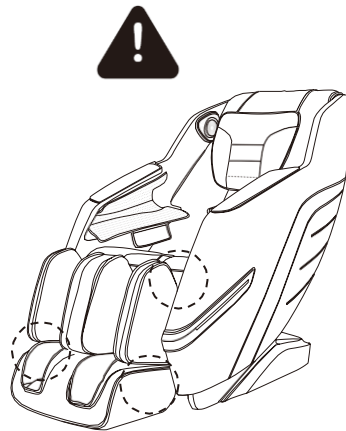


## Vor der Benutzung


### Einschalten

#### **Achtung**


Stromkabel einstecken

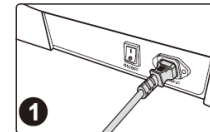

Netzteil in Steckdose

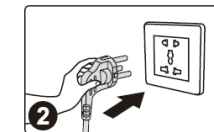


Massagessel einschalten von 0 auf I

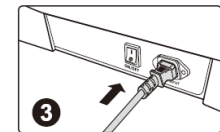

Bitte überprüfen Sie, ob das Netzkabel und der Netzstecker vor der Benutzung beschädigt sind.


Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung für dieses Produkt gemäß den Arbeitsstromanforderungen dieser Produktkalibrierung erfolgt.

 Es ist strengstens untersagt, eine andere Stromversorgung als die für dieses Produkt vorgesehene zu verwenden.

Es ist strengstens untersagt, ohne Genehmigung verschiedene Stromwandlergeräte anzuschließen, um dieses Produkt mit Strom zu versorgen.


# Produktstruktur

## Teilebeschreibung

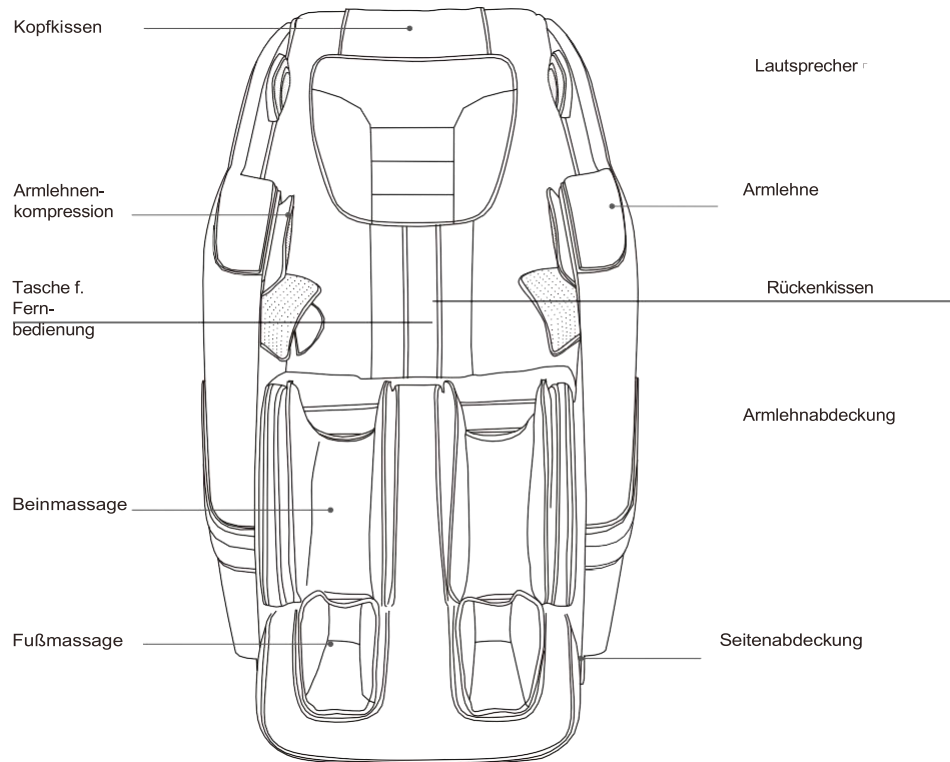


# Produktstruktur

## Funktionsverteilung

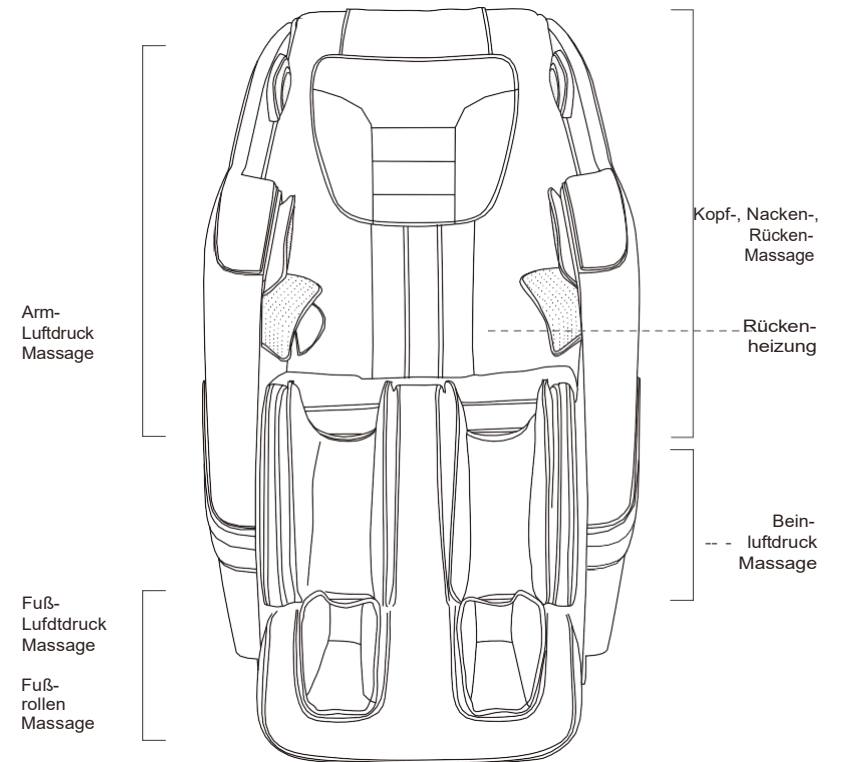

## Produktstruktur

### I. Einführung in die Fernbedienung

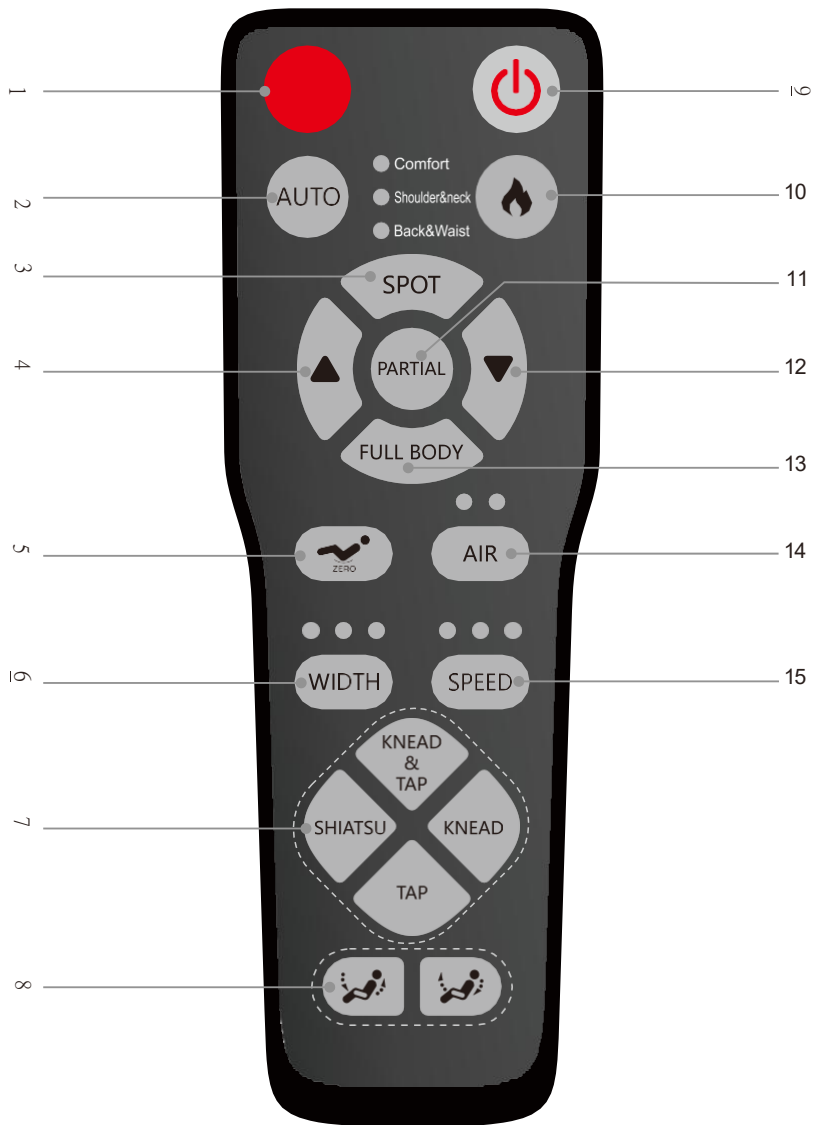

## Produktstruktur

### Pause/Start Taste

- Pausiert oder startet alle Massagefunktionen

### 2. Automatik Taste

- Siehe Seite 14 dieser Bedienungsanleitung

### 3. Punkt-Massage Taste

- Siehe Seite 16 dieser Bedienungsanleitung

### 4. Schulter-Höher-Taste

- Manuelles Anheben der Schulterposition

### 5. Auto-Liegefunktion

- Es gibt drei automatische Liegepositionen sowie Rückenstell- und Aufrichtpositionen die je nach Bedarf zyklisch geschaltet werden können.

### 6. Breiteneinstellung

- Einstellbar in 3 Modi: breit – mittel - schmal.

### 7. Technik-Taste

- Siehe Seite 15 dieser Bedienungsanleitung.

### 8. Koppelungs-Taste für die Hebefunktion

- Siehe Seite 14 dieser Bedienungsanleitung.

### 9. Netztaste (Ein/Aus)

- Schaltet alle Massagefunktionen ein oder aus.

### 10. Rückenheizungs-Taste

- Heizungs ein-/oder ausschalten

### 11. Teilmassage Taste

- Siehe Seite 16 dieser Bedienungsanleitung.

### 12. Schulter-Tiefer-Taste

- Manuelles Absenken der Schulterposition.

### 13. Ganzkörpermassage-Taste

- Siehe Seite 16 dieser Bedienungsanleitung.

### 14. Luftdruckeinstellungs-Taste

- Hier kann die Stärke des Luftdrucks eingestellt werden



### 15. Geschwindigkeitseinstellungs-Taste

- Drei Geschwindigkeiten einstellbar: langsam – mittel - schnell


## Bedienungsanleitung

### II Massage starten




**1.** Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Massage zu starten, der Standardmodus ist die Comfortmassage. **2.** Automatische Winkeleinstellung (Sie können die "AUTO" Taste drücken, um zu überspringen). **3.** Automatische Erkennung der Schulterhöhe, halten Sie die Sitzhaltung passend zum Massagesessel (Sie können die "AUTO" Taste drücken, um zu überspringen). **4.** Feinjustierung der Schulterposition: Wenn die erkannte Position von der tatsächlichen Schulterposition abweicht, passen Sie sie an die entsprechende Position an, indem Sie die "Aufwärts- und Abwärtstaste der Schulterposition drücken (Sie können die "AUTO" Taste drücken, um zu überspringen). Es gibt insgesamt 11 Schulter-Positionen. Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Anpassung erfolgt, wird die Massagefunktion aktiviert.

Taste	Beschreibung
	Bewegt die Massagerollen nach oben in eine geeignete Position.
	Bewegt die Massagerollen nach unten in eine geeignete Position.

### • Automatische Massage





Taste	Auto program	Beschreibung	Anzeige
	Comfort	Die komfortabelste Massageerfahrung.	<input checked="" type="radio"/> Comfort <input type="radio"/> Shoulder&neck <input type="radio"/> Back&Waist
	Shoulder&neck	Fokus auf Schulter- und Nackenmassage.	<input type="radio"/> Comfort <input checked="" type="radio"/> Shoulder&neck <input type="radio"/> Back&Waist
	Back&waist	Fokus auf Rücken- und Taillenmassage.	<input type="radio"/> Comfort <input type="radio"/> Shoulder&neck <input checked="" type="radio"/> Back&Waist

### • Verstellen des Liegewinkels


Taste	Funktion	Beschreibung
	Sit up	Taste drücken: das Rückenteil hebt sich langsam, die Wadenstütze senkt sich, und es ertönt ein „di...di...“, bis die höchste Position erreicht ist. Drücken Sie die Taste erneut im Sitzen, um sofort zu stoppen.
	Lie down	Taste drücken: das Rückenteil senkt sich langsam, die Wadenstütze hebt sich, und es ertönt ein „di...di...“, bis die unterste Position erreicht ist. Drücken Sie die Taste erneut während des Senkens, um sofort zu stoppen
	Zero-G	Erstes Drücken: wird auf den automatischen Flugmodus umgeschaltet, mit insg. 4 Modi (einschl. Ruhe- und Stehmodus), die zyklisch umgeschaltet werden können. Taste für 3 Sekunden lang drücken, um die Sprachsteuerung ein- oder auszuschalten.

## Bedienungsanleitung


### • Manuelle Massage

Taste	Autm. Prog.	Beschreibung
	Knead	Geschwindigkeit.
	Tap	Geschwindigkeit, Breite.
	Knead & tap	Geschwindigkeit.
	Shiatsu	Geschwindigkeit, Breite.

### • Breiteneinstellung






Funktion	Taste	Beschreibung	Stufen	Anzeige
Width adjustment		Mit 3-stufiger Einstellung: Schmal, Mittel, Breit (zyklisch schaltbar)	Schmal	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
			Mittel	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
			Breit	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

### • Geschwindigkeitseinstellung


Funktion	Taste	Beschreibung	Stufen	Anzeige
Speed adjustment		Mit 3-stufiger Einstellung: 1, 2, 3 (zyklisch schaltbar)	1	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
			2	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
			3	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

## Bedienungsanleitung


### • Massageintervall

Funktion	Taste	Beschreibung	
Rücken Dehnung		Massage an einem festen Punkt (Punktmassage)	
		Massage in einem kleinen (lokalen) Bereich mit Auf- und Abbewegung	
		Ganzkörpermassage mit Auf- und Abbewegung (vollständiger Durchlauf)	
Positions- anpassung		Anpassung der Massageposition (im Punkt- und Teilmodus anpassbar)	Rollen fahren nach oben
			Rollen fahren nach unten

### • Luftdruckmassage mit einstellbarer Intensität

Funktion	Taste	Beschreibung	Stufen	Anzeige
Luft- intensität einstellen		WMit 3-stufiger Einstellung und Aus- Zustand (zyklisch)	1	● ○
			2	○ ●
			3	● ●
			OFF	○ ○

### Weitere manuelle Funktion:

Funktion	Taste	Beschreibung
Wärme		PDrücken Sie diese Taste, um die Ferninfrarot- Wärmefunktion am Rücken ein-/auszuschalten. Sie erwärmt sich nach ca. 3 Minuten.


## IV. Bedienungsanleitung für Bluetooth-Lautsprecherwiedergabe

- Öffnen Sie das Hauptmenü des Smart-Geräts, gehen Sie zu „**Einstellungen**“ und wählen Sie die „**Bluetooth**“-Optionen.
- Das Smart-Gerät sucht nach dem entsprechenden Bluetooth-Modell (z. B. IMCM-XXXX).  
Klicken Sie auf „**Verbinden**“, wenn Sie gefragt werden, ob Sie das Gerät koppeln möchten, bestätigen Sie einfach mit „**Koppeln**“, um die Verbindung abzuschließen.
- Öffnen Sie die Musik-App auf Ihrem Smart-Gerät und wählen Sie das gewünschte Lied aus.


## Bedienungsanleitung

### VI. Massage beenden


- Während des Massagevorgangs drücken Sie die **Ausschalt-Taste** auf dem Touchscreen-Controller, um alle Massagefunktionen sofort zu beenden. Die Rückenlehne und die Beinstütze werden dabei zurückgesetzt. Oder: Wenn der Massagetimer abläuft, werden alle Massagefunktionen automatisch ausgeschaltet, aber Rückenlehne und Beinstütze bleiben in ihrer Position.
- Schalten Sie die gesamte Stromversorgung des Geräts aus.

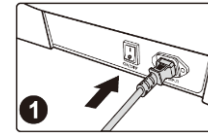

1 Ausschalten (0 Position)

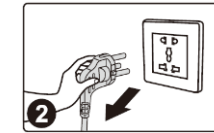

2 Netzstecker ziehen

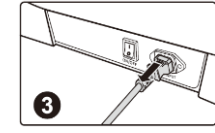


3 Stromkabel vom Gerät entfernen

## Polyurethan und Kunststoffteile reinigen

Wischen Sie das Polyurethan mit einem weichen, trockenem Tuch ab.

- **Keine** Chemikalien wie Verdünner, Benzin, Alkohol usw. zur Reinigung des Geräts benutzen.
- Wenn Sie handelsübliche Lederpflegeprodukte (Tücher) verwenden, befolgen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.
- Wenn das Polyurethan besonders schmutzig ist, wischen Sie es auf folgende Weise ab:
  1. Ein weiches Tuch in Wasser oder warmes Wasser mit 3–5 % neutralem Reinigungsmittel eintauchen, gut auswringen.
  2. Mit dem oben genannten feuchten Tuch die Lederoberfläche abwischen.
  3. Reinigungslösung mit einem in klarem Wasser ausgewaschenen Tuch abwischen.
  4. Mit einem gut ausgewringenen weichen Tuch abwischen.
  5. An der Luft trocknen lassen.
- Bei hartnäckigen Flecken kann ein handelsüblicher Melamin-Schaum in neutralem Reinigungsmittel verwendet und das Gerät damit abgewischt werden.
- Verwenden Sie keinen Haartrockner, um die Oberfläche zu trocknen.
- Da farbige Stoffe (z. B. Jeans) die PVC-Oberfläche verfärben können, seien Sie vorsichtig beim Kontakt mit solchen Textilien.
- Lassen Sie keine Kunststoffteile dauerhaft in Kontakt mit anderen Kunststoffen, dies kann zu Verfärbungen führen.
- Polyurethan kann durch Farbstoffe verfärbt werden. Decken Sie daher bei Verwendung von Farbstoffen den Kontaktbereich mit einem Tuch ab.

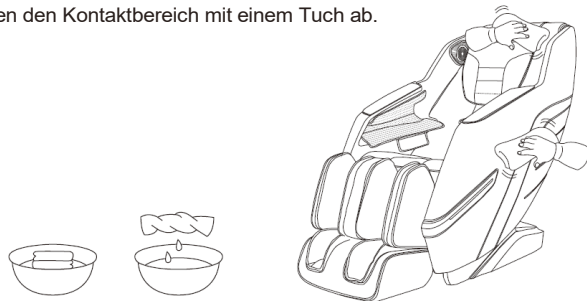

Fehler	Wenn der Wadenmechanismus oder die Rückenlehne eine bestimmte Position erreicht, funktioniert die Einstellung nicht weiter und es ertönt ein dauerhaftes „Piep“-Geräusch.
Lösung	Aufgrund der Konstruktion und ergonomischen Anforderungen besitzt das Produkt einen Schutzmechanismus für die maximale Verstellposition. Das Piepsignal weist darauf hin, dass die Grenze erreicht ist.

Fehler	Funktionen arbeiten nicht oder nur teilweise nach dem Einschalten.
Lösung	Nach dem Einschalten muss manuell ein Automatikprogramm oder ein anderer Modus gewählt werden. Wird dies nicht getan, schaltet sich das Gerät nach 20 Minuten automatisch aus. Einige Funktionen im manuellen Modus müssen ebenfalls manuell aktiviert werden.

Fehler	Das Gerät macht ein reibendes Ledergeräusch bei der Positionsverstellung.
Lösung	Das Produkt verwendet hochwertiges, korrosionsbeständiges Leder gemäß Umwelтанforderungen. Aufgrund der Materialeigenschaften können Reibegeräusche beim Positionswechsel entstehen – dies ist normal. <b>Achtung:</b> Wenn ein Rissgeräusch oder Lederreißen hörbar ist, beenden Sie die Nutzung sofort und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Fehler	Das Massage-Rad erreicht Schultern oder Nacken nicht.
Lösung	Wenn der Kopf nicht auf dem Kissen liegt oder der Rücken die Rückenlehne nicht berührt, wird die Schulterposition möglicherweise falsch erkannt. Setzen Sie sich in die tiefste Position, lehnen Sie den Kopf an und starten Sie den Erkennungsprozess erneut.

Fehler	Das Gerät ist defekt. Netzkabel oder Stromversorgung fehlerhaft.
Lösung	Zur Unfallvermeidung kontaktieren Sie bitte den autorisierten Kundendienst.

## Bedienungsanleitung

---

### Fehlerbehebung

---

Fehler	Der Massagesessel bleibt in ausgeklappter Position stehen.
Lösung	Der Massagesessel bleibt in ausgeklappter Position in folgenden Fällen stehen: 1. Stromausfall, 2. Plötzliche Unterbrechung der Stromversorgung, 3. Nach Abschluss des Massageprogramms (die Funktion wie Rollen, Luftkissen, oder Heizung werden abgeschaltet, der Sessel bleibt jedoch in der ausgeklappten Position). Um den Sessel wieder in die Ausgangsposition muss er eingeschaltet werden und über die Taste auf der Fernbedienung oder am Bedienerfeld gefahren werden.

Bitte zögern Sie nicht, sich bei Fragen oder Unklarheiten zu diesem Produkt an den zuständigen Kundendienst zu wenden..

## Bedienungsanleitung

---

### Produktspezifikationen

---

Model: IG 1700

Name: Massage Sessel

Nennspannung: 110-120V- 60Hz  
220-240V- 50Hz/60Hz

Nennleistung: 70W

Betriebszeit: 20min

Sicherheitsklasse: 1 I

Materialbeschreibung: PVC, PA, Metallteile, elektrische Komponente

MATERIAL	PU	LEDER	STOFF	HOLZ

