


IREST EASYQ (IG 1050) Massagesessel

BEDIENUNGSANLEITUNG

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

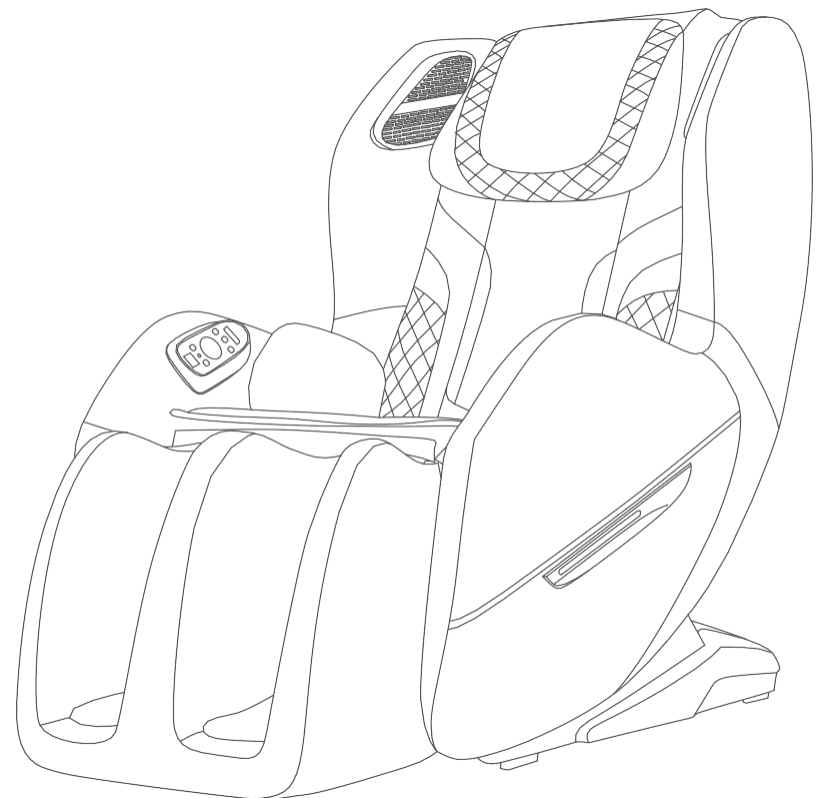

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich vor der Inbetriebnahme mit der richtigen Verwendung des Produkts vertraut zu machen. Bitte beachten Sie insbesondere die wichtigen Sicherheitshinweise und bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch sorgfältig auf.

Hinweis: Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Design des Produkts und dessen Beschreibung zu ändern. Sollten Abweichungen zwischen der Funktion des im Handel erhältlichen Produkts und der Beschreibung im Handbuch bestehen, handelt es sich um eine normale Produktaktualisierung, über die unser Unternehmen Sie nicht gesondert informieren wird. Maßgeblich sind die tatsächlichen Produktfunktionen und -farben.

INHALTSVERZEICHNIS

Vor der Verwendung

Sicherheitshinweise	02-04
Montage	05
Massagesessel platzieren	06-07
Vor Gebrauch	08-09
Produktaufbau	10-13

Anwendungshinw

~~eise~~

Bedienungsanleitung	14-18
Massage beenden	18

Wartung



Reinigung und Pflege	19
----------------------------	----

Wichtig.....


Fehlerbehebung	20
Produktspezifikationen	21


Sicherheitshinweise müssen beachtet werden

- Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle relevanten Anweisungen sorgfältig durch.
- Die hier aufgeführten Hinweise helfen Ihnen, das Produkt sicher und richtig zu verwenden.
- Um das Ausmaß der Gefahren und Schäden deutlich zu machen, werden die Vorsichtsmaßnahmen in „**Warnung**“ und „**Achtung**“ unterteilt, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden können. Beide sind für die Sicherheit wichtig und müssen beachtet werden.


 Warnung	Weist darauf hin, dass unsachgemäße Verwendung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
 Achtung	Weist darauf hin, dass eine unsachgemäße Verwendung zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen kann.


- Bitte beachten Sie das Symbol vor jedem Sicherheitshinweis.


 Verboten	Absolutes Verbot
---	------------------

Die folgenden Personengruppen sollten dieses Produkt nicht verwenden	
 Verboten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen Behinderungen, sensorischen oder neurologischen Beeinträchtigungen oder denen es an Erfahrung und gesundem Menschenverstand mangelt, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt und angeleitet. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit den Instrumenten spielen. ■ Patienten mit Osteoporose. ■ Patienten mit Herzerkrankungen oder solche, die elektronische medizinische Geräte wie beispielsweise einen Herzschrittmacher tragen. ■ Personen, die Fieber haben. ■ Schwangere Frauen oder Frauen während ihrer Menstruation. ■ Patienten, die verletzt sind oder an einer Hautkrankheit leiden. ■ Ohne Aufsicht dürfen Kinder unter 14 Jahren und bewusstlose Personen dieses Produkt nicht verwenden. ■ Personen, denen von ihrem Arzt Ruhe verordnet wurde oder die sich unwohl fühlen. ■ Personen, deren Körper nass ist, dürfen dieses Produkt nicht verwenden. ■ Dieses Produkt hat eine heiße Oberfläche. Personen mit verminderter Wärmeempfindlichkeit müssen bei der Verwendung dieses Produkts besonders vorsichtig sein. ■ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren von einem Fachmann des Herstellers, dessen Kundendienst oder einer ähnlichen Abteilung

Sicherheitshinweise müssen beachtet werden

Wichtige Sicherheitshinweise	
 Warnung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lassen Sie Kinder nicht an bewegliche Teile dieses Produkts gelangen. ■ Verwenden Sie ein ordnungsgemäß geerdetes Netzteil, das für dieses Produkt geeignet ist. ■ Ziehen Sie nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden. ■ Bedienen Sie dieses Produkt gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung. ■ Verwenden Sie keine Teile oder Zubehörteile, die nicht empfohlen werden. ■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien. ■ Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. ■ Verwenden Sie dieses Produkt niemals für andere, hier nicht aufgeführte Zwecke. ■ Es wird eine Nutzungsdauer von jeweils 20 Minuten empfohlen. ■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn die Hülle oder das Leder Risse aufweist oder beschädigt ist. ■ Lassen Sie keine Gegenstände in dieses Produkt fallen. ■ Schlafen Sie niemals ein, während Sie dieses Produkt verwenden. ■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen. ■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht innerhalb einer Stunde nach einer Mahlzeit. ■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit übermäßiger Kraft, um Verletzungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise	
 Achtung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prüfen Sie, ob die Spannung mit den technischen Daten dieses Produkts übereinstimmt. ■ Stecken Sie den Stecker niemals mit nassen Händen ein oder ziehen Sie ihn niemals mit nassen Händen heraus. ■ Lassen Sie kein Wasser in dieses Produkt eindringen, um einen Stromschlag zu vermeiden oder Schäden am Produkt zu verursachen. ■ Ziehen Sie beim Ein- oder Ausstecken nicht am Netzkabel. Eine unsachgemäße Handhabung ist verboten. ■ Beschädigen Sie das Kabel nicht und nehmen Sie keine Änderungen am Schaltkreis dieses Produkts vor. ■ Reinigen Sie stromführende Teile dieses Produkts, wie z. B. den Netzschalter und den Stecker, nicht mit einem feuchten Tuch. ■ Halten Sie sich bei einem Stromausfall von diesem Produkt fern, um Verletzungen zu vermeiden, falls die Stromversorgung plötzlich wiederhergestellt wird. ■ Stellen Sie die Nutzung dieses Produkts sofort ein, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort. ■ Stellen Sie die Nutzung dieses Produkts ein, wenn Sie sich unwohl fühlen, und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Lagerbedingungen	
 Achtung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lagerraumtemperatur: 5 °C bis 40 °C. ■ Relative Luftfeuchtigkeit (RH) zwischen 20 % und 80 %; frei von korrosiven Gasen und in einem gut belüfteten Raum.

Sicherheitshinweise

müssen beachtet werden

Wartung und Instandhaltung des Produkts



Achtung

- Dieses Produkt darf nur von dem vom Hersteller benannten Kundendienstzentrum gewartet werden. Der Benutzer darf es ohne Genehmigung weder zerlegen noch warten.
- Vergessen Sie nicht, den Hauptschalter nach dem Gebrauch auszuschalten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn sich der Netzstecker gelöst hat.
- Wenn dieses Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollten Sie das Netzkabel aufrollen und das Produkt in einer trockenen und staubfreien Umgebung aufzubewahren.
- Lagern Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe offener Flammen. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Bitte reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Verdünnern, Benzol oder Alkohol.
- Die mechanischen Komponenten dieses Produkts sind speziell konstruiert und gefertigt, sodass keine besondere Wartung erforderlich ist.
- Stechen Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand in dieses Produkt.
- Rollen oder ziehen Sie dieses Produkt nicht über unebenen Boden. Heben Sie es stattdessen an, bevor Sie es bewegen.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt nur zeitweise. Lassen Sie es nicht über einen längeren Zeitraum ununterbrochen laufen.

Betriebsumgebung



Achtung

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer sehr feuchten Umgebung wie beispielsweise im Badezimmer.
- Stellen Sie die Nutzung dieses Produkts sofort ein, wenn sich die Umgebungstemperatur stark ändert.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in stark staubiger oder korrosiver Umgebung.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einem kleinen Raum oder an einem Ort ohne gute Belüftung.

Lösungen für gewöhnliche Störungen






Achtung

- Wenn der Motor während des Betriebs dieses Produkts Geräusche macht, handelt es sich um normale Betriebsgeräusche.
- Wenn der Regler nicht normal funktioniert, überprüfen Sie, ob der Stecker fest in der Steckdose sitzt und ob der Netzschalter eingeschaltet ist.
- Wenn die Nennbetriebszeit abgelaufen ist, aktiviert dieses Produkt automatisch die Ausschalttaste; wenn dieses Produkt über einen längeren Zeitraum in Betrieb bleibt, schaltet der Temperaturschutz das Produkt automatisch ab. Das Produkt kann nach einer halben Stunde wieder verwendet werden.

Montage

Montageanleitung für die Sessel-Wadenkomponente

1. Setzen Sie die Isolierteile jeweils in die Haken an der Wadenkomponente ein (Abbildung 1).
2. Heben Sie die Wadenkomponente an, setzen Sie den Aufhängungshaken entsprechend ein und führen Sie dann die Stiftschiene ein. Stecken Sie zum Schluss den R-förmigen Stift in die Stiftschiene (Abbildung 2).
3. Nachdem Sie den Luftschlauch und den Kabelbaum in der Wadenkomponente mit dem Massagesessel verbunden haben, überprüfen Sie, ob beim Auf und Ab bewegen alles normal funktioniert, und die Montage der Wadenkomponente ist abgeschlossen (Abbildung 3).

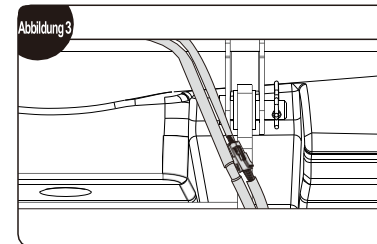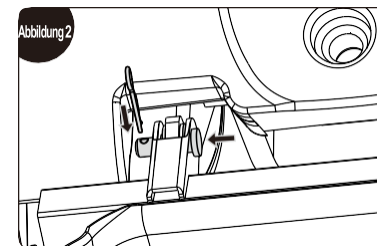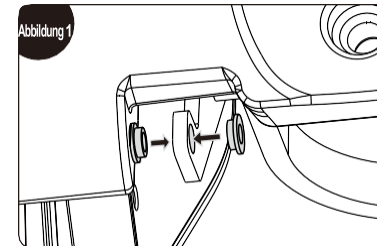


Massagesessel platzieren

Aufstellungsort

Stellen Sie sicher, dass genügend Platz vorhanden ist, damit der Massagesessel um mindestens 30 cm nach hinten geneigt werden kann.



Setzen Sie den Massagesessel nicht direkt hohen Temperaturen durch Wärmestrahlung aus (z. B. vor Heizgeräten) und stellen Sie ihn an einem Ort auf, an dem hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden können. Für den langfristigen Gebrauch an einem festen Standort wird empfohlen, eine weiche Unterlage auszulegen. Die Unterlage sollte groß genug sein, um den Bereich abzudecken, in dem das Gerät den Boden berührt, sowie den Bereich, in dem Ihre Füße den Boden berühren.

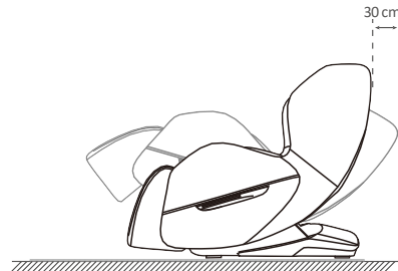


Anleitung zum Anheben des Produkts

Zum Anheben und Bewegen des Stuhls ist Teamarbeit erforderlich, um Verletzungen zu vermeiden.



- Bitte heben Sie den Massagesessel an, um ihn auf empfindlichem Untergrund wie z. B. einem Holzboden zu bewegen.
- Beim Bewegen auf einem holzähnlichen Boden wird empfohlen, ihn anzuheben. Vermeiden Sie Beschädigungen an den Rollen. Wenn der Stuhl angehoben und an die vorgesehene Position bewegt wird, achten Sie darauf, Ihre Hände aus dem Weg zu halten, um Verletzungen zu vermeiden, und achten Sie darauf, dass Ihre Füße nicht eingeklemmt werden. Lassen Sie das Gerät nicht los, bis es vollständig auf dem Boden steht; der Boden könnte beschädigt werden, daher wird empfohlen, Matten o. Ä. auf den Boden zu legen.

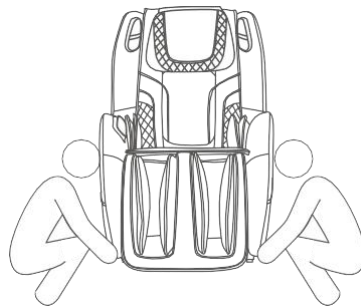

Massagesessel platzieren

Transport


Verwenden Sie die hinteren Rollen, um den Massagesessel zu bewegen. Bewegen Sie den Sessel, indem Sie ihn wie in der Abbildung gezeigt.

HINWEIS: Übermäßige Kippkraft führt dazu, dass der Sessel vollständig umkippt und das Produkt beschädigt wird.



- Schalten Sie das Gerät vor dem Bewegen bitte ordnungsgemäß aus, um das gesamte Gerät zurückzusetzen, und trennen Sie dann die Stromversorgung.
- Bitte halten Sie den Stuhl beim Transport frei. (Personen, Haustiere oder Gegenstände dürfen sich nicht auf dem Stuhl befinden.)
- Überqueren Sie beim Transport keine Absätze, die höher als 2 mm sind, oder Lücken, die größer als 5 mm sind.
- Wenn Sie dieses Produkt mit Rollen bewegen, ist eine einzige durchgehende Bewegung nicht möglich; wenn die Entfernung 50 Meter überschreitet, bewegen Sie dieses Produkt bitte




langsam und gleichmäßig.

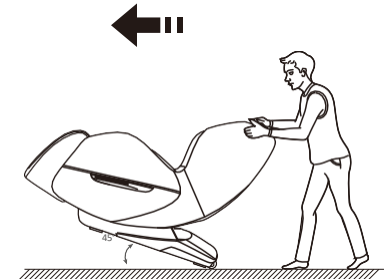

So bauen Sie das Kopfstützenkissen und das Rückenpolster auseinander und verwenden sie

Die Verwendung eines Nackenkissens kann die Intensität der Knetmassage im Nacken- und Schulterbereich verringern, und Sie können


selbst entscheiden, ob Sie eine Kopfstütze verwenden möchten (die Verwendung eines Kopfstützenkissens wird empfohlen). Das Rückenlehnenkissen und die Rückenlehne sind durch einen Reißverschluss verbunden, und das Kopfstützenkissen und das Rückenlehnenkissen sind durch einen Reißverschluss verbunden.

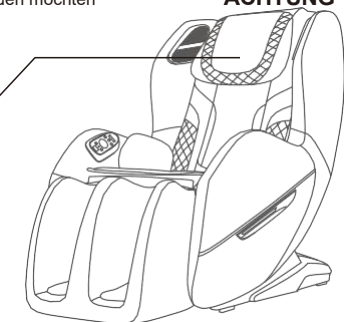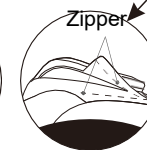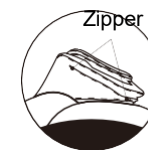

Vor Gebrauch


Umgebung überprüfen

Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Haustiere und andere Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.

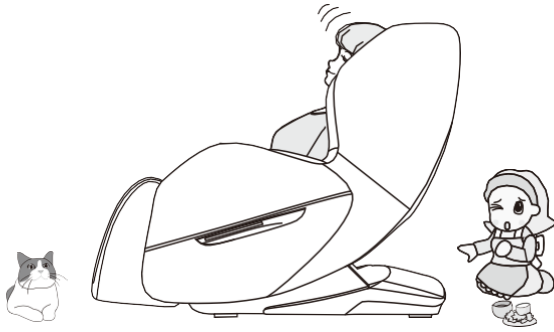

Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper in den Spalten des Geräts befinden

Vergewissern Sie sich vor der Massage, dass sich keine Fremdkörper in den Beinen, Füßen usw. befinden.
Lassen Sie unter keinen Umständen zu, dass Hände, Füße und Kopf in den Bereich zwischen dem Unterschenkelmechanismus und dem Hauptkörper oder in den Bereich zwischen der Armlehne und der Kapsel gelangen.
Hände, Füße oder der Kopf dürfen unter keinen Umständen unter den Stoff- oder Lederbezug des Massagebereichs geraten.

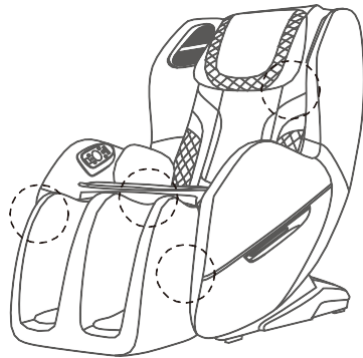


Vor Gebrauch


Schalten Sie das Gerät ein




Netz Kabel einstecken

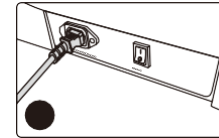

Kabel an Stromquelle Anschließen

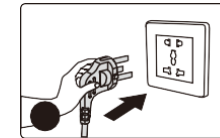


Ein-Schalter betätigen ("I" Position)

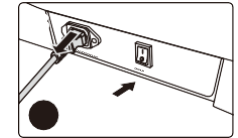

- Bitte überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker vor der Verwendung auf Beschädigungen.
- Bitte versorgen Sie dieses Produkt mit Strom gemäß den Stromversorgungsanforderungen der Kalibrierung dieses Produkts.
- Es ist strengstens untersagt, ein anderes Netzteil als das für dieses Produkt vorgesehene zu verwenden.
- Es ist strengstens untersagt, verschiedene Stromwandlergeräte ohne Genehmigung anzuschließen, um dieses Produkt mit Strom zu versorgen.


Produktstruktur

Beschreibung der Teile

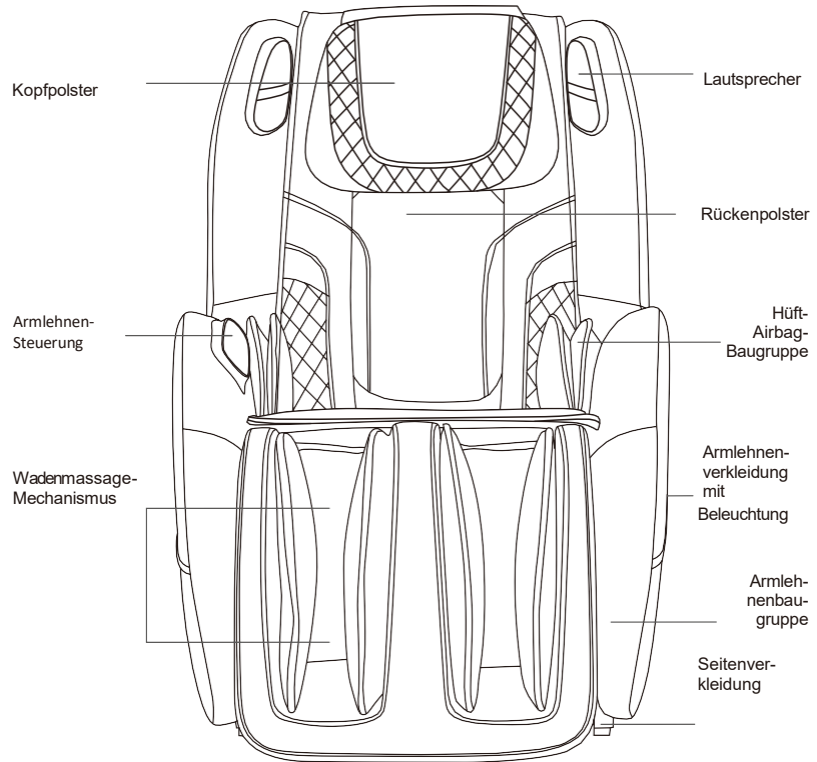


Produktstruktur

Funktionsverteilung

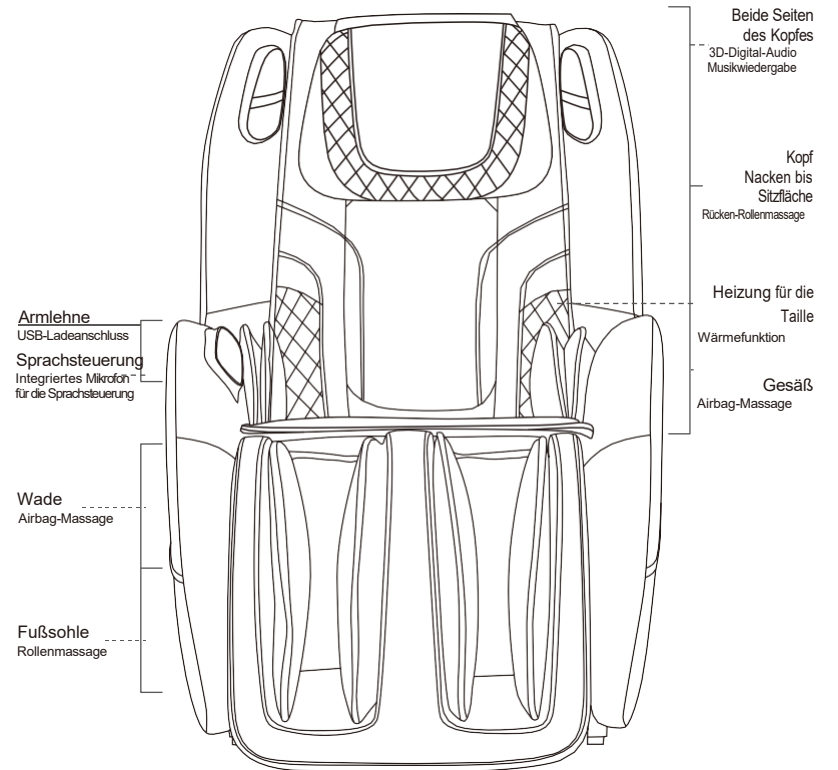

Produktstruktur

I, Einführung in die Armlehnen-Steuerung

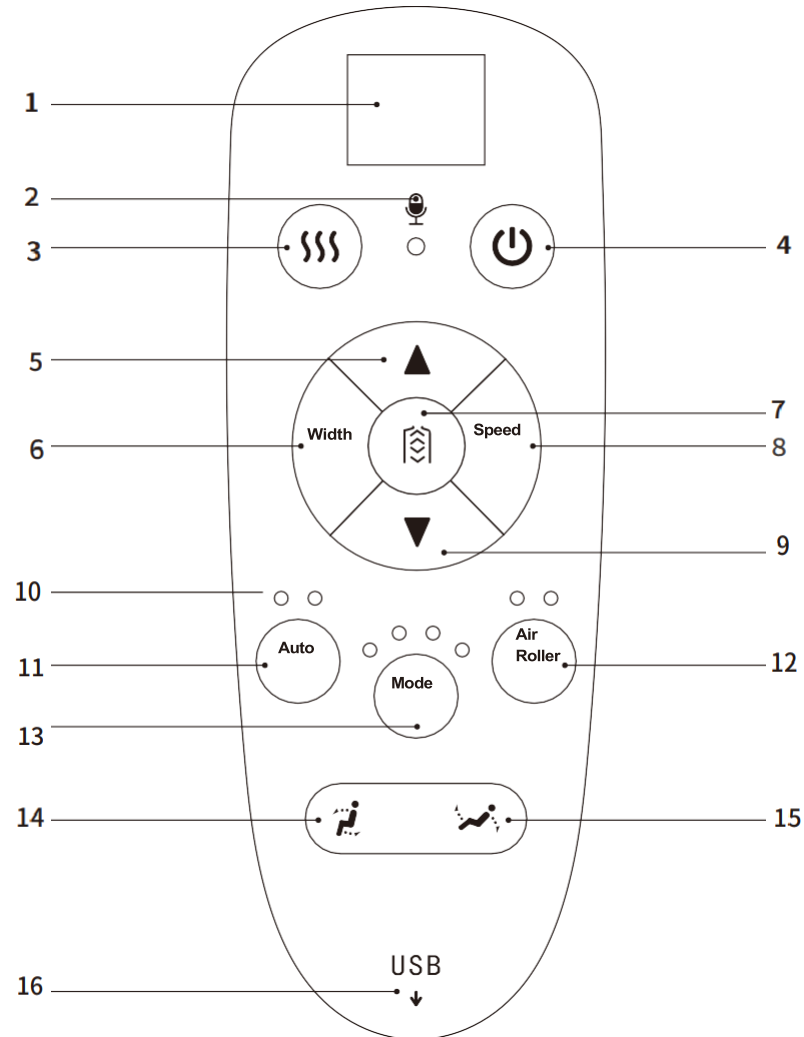

Produktstruktur

Anzeige:


1. Anzeige des Massagemodus und der Zeit.
2. Aktivierung für die Spracherkennung:
·Aktivierung der Sprachsteuerungsfunktion.
3. Taste für die Heizfunktion:
·Schaltet die Heizfunktion ein oder aus.
4. Stromversorgung:
·Alle Massagefunktionen ein-/ausschalten
5. Taste zur Einstellung des Massagebereichs:
·Massageposition nach oben verstellen.
6. Taste für die Breite:
·Einstellung der Breite der Massagekugeln.
·Legende zum Massagebereich.
7. Taste zur Einstellung des Massagebereichs:
·Einstellung des Massagebereichs.
8. Geschwindigkeits-Taste:
·Einstellung der Geschwindigkeit der Massagetechnik.
9. Taste zur Einstellung des Massagebereichs:
·Verstellen Sie die Massageposition nach unten.
10. LED-Funktionsanzeige:
·Anzeige der Massagefunktion.
11. Taste für automatische Massage:
·Umschaltung der automatischen Massagefunktion.
12. Luftdruck:
·Drücken Sie diese Taste kurz, um die Luftdruckfunktion auszuwählen: schwach, stark und ausgeschaltet.
·Langes Drücken: Ein-/Ausschalten der Rollfunktion.
13. Taste für Massagetechnik:
·Einstellung der Massagetechnik.
14. Hebetaste:
·Stellen Sie die Position ein, in der sich der Rückenrahmen anhebt und der Unterschenkelrahmen absinkt.
15. Senktaste:
·Stellen Sie die Position ein, bei der der Rückenrahmen absinkt und der Unterschenkelrahmen angehoben wird.
16. USB-Anschluss:
·USB-Ladeanschluss für Mobiltelefone.

Bedienungsanleitung

II. Massage starten









1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Massage zu starten; der Massagesessel neigt sich automatisch nach hinten.
2. Wenn Sie „Bi Bi“ hören (Anzeige HH), können Sie die Schulterposition mit den Auf- und Ab-Tasten einstellen. Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Einstellung vorgenommen wird, startet die Massage automatisch.
3. Standardmäßig ist die automatische Massage eingestellt, Sie können jedoch auch andere Massageprogramme auswählen.

A). Automatische Massage




Name	Taste	Massagefunktion	Anzeige
Automatische Massage		Schnellmassage: Erleben Sie schnell alle Massageeffekte.	A1
		Komfort-Massage: Das angenehmste Massageerlebnis.	A2
		Entspannungsmassage: Eine sanfte und wohltuende Tiefenmassage, die körperliche Erschöpfung lindern und den Körper entspannen kann.	A3
		Ganzkörpermassage: Tiefenmassage, die die Vitalität des Körpers wiederbeleben kann.	A4
		Nacken- und Schultermassage: Nach einer einzigartigen Nacken- und Schultermassagemethode können durch wirksame Massage der Halswirbelsäule und der Schulterblätter Nacken- und Schulterschmerzen gelindert und die Ermüdung von Nacken und Schultern gelindert werden.	A5
		Rücken- und Taillenmassage: Konzentriert sich auf den Rücken und die Taille, um Rücken- und Taillenverspannungen zu lindern.	A6
		Dehnungsmassage: Der Unterschenkelrahmen und der Rückenlehnenrahmen werden angehoben und abgesenkt, um die Beine und die Taille zu dehnen und zu strecken, wodurch Müdigkeit wirksam gelindert, Gelenkschmerzen gemildert und die Vitalität wiederhergestellt werden.	A7
		Sport-Erholung: Schnelle Erholung von körperlicher Ermüdung nach dem Training.	A8

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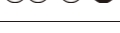Bedienungsanleitung

B). Manuelle Massage


Name	Taste	Massagefunktion	Anzeigestatus
Modus		Kneten: Die Geschwindigkeit ist einstellbar; die Kontrollleuchte I leuchtet.	
		Klopfen: Geschwindigkeit und Breite sind einstellbar; die Kontrollleuchte II leuchtet.	
		Kneten und Klopfen: Die Geschwindigkeit ist einstellbar; die Kontrollleuchte III leuchtet.	
		Shiatsu: Geschwindigkeit und Breite sind einstellbar; Kontrollleuchte IV leuchtet.	
		Klopfen: Geschwindigkeit und Breite sind einstellbar; Kontrollleuchte I II leuchtet.	
Breiten-Taste		Drei Intensitätsstufen	d1, d2, d3
Geschwindigkeit s-Taste		Drei Geschwindigkeitsstufen	P1, P2, P3

C).Einstellung des Massagebereichs


Name	Schaltfläche	Massagefunktion	Anzeigezustand
Massagebereich		Fester Punkt: Massage an einer festen Position.	H0
		Teilweise: Teilmassage eines kleinen Bereichs.	H1
		Oberkörper: Massage des Oberkörpers.	H2
		Unterkörper: Massage des Unterkörpers.	H3
		Ganzkörper: Ganzkörpermassage.	H4
Auf-Taste		Einstellung der Massageposition (im Festpunkt- und Teilmodus können Sie die Auf- und Ab-Tasten verwenden, um die Massageposition anzupassen).	Massagehand nach oben
Ab-Taste			Massagehand nach unten

Bedienungsanleitung



D). Heizfunktion

Name	Taste	Messagefunktion	Anzeige Status
Wärme		Schalten Sie die Heizfunktion ein.	h1
		Schalten Sie die Heizfunktion aus.	h0

E). Luftdruckmassage

Name	Taste	Messagefunktion	Anzeige Status
Luftdruckmodus		Drücke diese Taste kurz, um die Luftdruckfunktion auszuwählen: schwach (Weak), stark (Strong) und ausgeschaltet.	Weak <input type="radio"/> Strong <input type="radio"/>
		Langes Drücken: Walzenfunktion ein-/ausschalten.	L1, L0

F). Die Position der Rückrahmenverstellung

Name	Taste	Messagefunktion
Hebetaste		Halten Sie diese Taste gedrückt, dann fährt der Rückenlehnenrahmen langsam nach oben, der Wadenrahmen langsam nach unten, und der Vorgang stoppt. Wenn Sie sich ganz aufrichten, stoppen Sie den Aufwärtsvorgang
Taste zum Zurücklehnen		Halten Sie diese Taste gedrückt, der Rückenlehnenrahmen neigt sich langsam nach hinten, der Wadenrahmen hebt sich langsam an; wenn Sie die Taste loslassen, stoppt die Bewegung. Dies ist die maximale Neigung.

Bedienungsanleitung

III. Sprachsteuerungsmodus

·Wenn der Massagesessel eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet, sagen Sie „Hi Alice“ oder „Hey Alice“, um die Sprachsteuerungsfunktion zu aktivieren.
 ·Nachdem diese Funktion erfolgreich aktiviert wurde, antwortet der Massagesessel mit „Ich bin bereit“.
 ·Sobald in diesem Moment ein entsprechender Sprachbefehl zur Ausführung gegeben wird, kann die entsprechende Sprachsteuerungsfunktion ausgeführt werden, sobald eine Antwort vom Massagesessel empfangen wurde; wird innerhalb von sechs Sekunden kein korrekter Sprachbefehl gegeben, wird die Sprachsteuerungsfunktion automatisch deaktiviert und muss erneut aktiviert werden.
 ·Hinweis: Bitte verwenden Sie beim Aktivieren der Sprachsteuerungsfunktion Englisch und sprechen Sie in moderatem Tempo. Sprachbefehle sollten auf den Sprachbefehlseingabe folgen.

Sprachsteuerung

Eingabe: „Hi Alice“ oder „Hey Alice“. Antwort: I am here.		
Nr.	Sprachbefehl	Antwort-Eingabe
1	Massage on	Antwort: Ok, massage on
2	Massage close	Antwort: Ok, massage close
3	Comfort massage	Antwort: Ok, comfort massage
4	Relax massage	Antwort: Ok, relaxe massage
5	Full body massage	Antwort: Ok, full body massage
6	Neck and shoulder massage	Antwort: Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage	Antwort: Ok, back and waist massage
8	Stretch massage	Antwort: Ok, stretch massage
9	Fixed massage	Antwort: Ok, fixed massage
10	Change the other mode	Antwort: Ok, change the other mode
11	Go little down	Antwort: Ok, go little down
12	Go little up	Antwort: Ok, go little up
13	Open the air pressure	Antwort: OK, open the air pressure
14	Close the air pressure	Antwort: OK, , close the air pressure
15	Up the seat position	Antwort: Ok, up the seat position
16	Down the seat position	Antwort: Ok, down the seat position
17	Stop adjustment	Antwort: Ok, stop adjustment

Bedienungsanleitung


IV. Bedienungsanleitung für die Wiedergabe über den Bluetooth-Lautsprecher

1. Rufen Sie das Hauptmenü des Smart-Geräts auf. Öffnen Sie „Einstellungen“ und wählen Sie die Option „Bluetooth“. Öffnen Sie „Bluetooth“; Bluetooth sucht automatisch nach einem neuen Bluetooth-Gerät.
2. Das Smart-Gerät sucht nach dem entsprechenden Bluetooth-Modell (z. B. IMCM-XXXX). Klicken Sie auf die Schaltfläche „Koppeln“. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie das Gerät koppeln möchten, wählen Sie einfach „Koppeln“, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.
3. Schalten Sie den „Musik-Player“ auf dem Smart-Gerät ein und wählen Sie den Titel aus, der abgespielt werden soll.


V. Massage beenden

Drücken Sie während der Massage die Taste „U“ an der Armlehne, um die Massage zu beenden. Dadurch werden alle Massagefunktionen ausgeschaltet und die Rücken- und Beinlehne zurückgesetzt. Wenn die Massagezeit abgelaufen ist, schaltet sich die Massage automatisch aus, und der Rücken- sowie der Beinmechanismus werden nicht zurückgesetzt. Schalten Sie die Stromversorgung des gesamten Geräts aus, wie in der beigefügten Abbildung gezeigt (Schematische Darstellung der Stromabschaltung des gesamten Geräts).


Schalten Sie den Netzschalter aus (Stellung „0“)

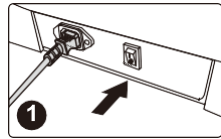

Schematische Darstellung des Herausziehens des Netzsteckers

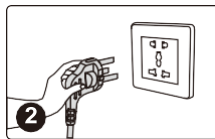

Ziehen Sie den Netzstecker

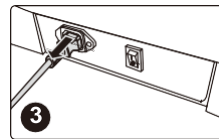


Reinigung und Wartung

Reinigung von Kunstleder und Kunststoffteilen

Wischen Sie das Kunstleder mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Chemikalien wie Verdüner, Benzol, Alkohol usw.
- Befolgen Sie bei der Verwendung handelsüblicher Lederpflegeprodukte bitte die Gebrauchsanweisung.
- Wenn das Kunstleder besonders verschmutzt ist, wischen Sie es wie folgt ab:
 - ① Tauchen Sie ein weiches Tuch in Wasser oder heißes Wasser mit 3 % bis 5 % neutralem Reinigungsmittel und wringen Sie es anschließend gründlich aus.
 - ② Wischen Sie die Lederoberfläche mit dem oben genannten weichen Tuch ab.
 - ③ Wischen Sie die Reinigungslösung mit einem in klarem Wasser getränkten und gründlich ausgewrungenen Tuch ab.
 - ④ Wischen Sie mit einem ausgewrungenen weichen Tuch nach.
 - ⑤ Lassen Sie das Leder an der Luft trocknen.
- Wenn sich Flecken nur schwer entfernen lassen, tauchen Sie bitte handelsüblichen Melaminschaum in ein neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie das Gerät damit ab.
- Verwenden Sie zum Trocknen der Oberfläche keinen Föhn.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät mit Jeansstoff und farbigen Stoffen abwischen, da die Farbe auf das Kunstleder abfärben kann.
- Lassen Sie diese Teile nicht über einen längeren Zeitraum mit Kunststoff in Kontakt kommen, da dies zu Verfärbungen führen kann.
- Kunstleder kann sich verfärben; decken Sie daher bei der Verwendung von Haarfärbemitteln den betroffenen Bereich bitte mit einem Handtuch ab.

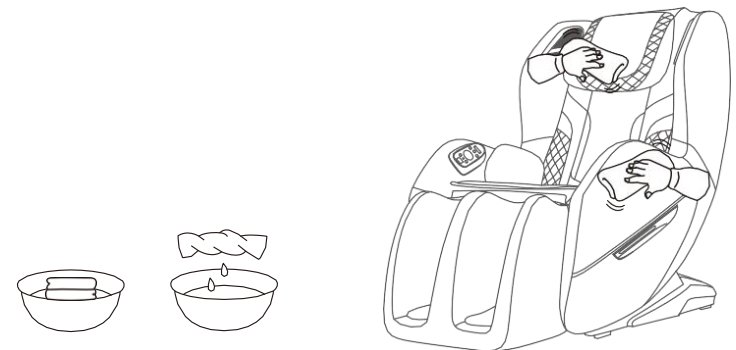

Fehlerbehebung

Fehler	Wenn der Wadenmechanismus oder die Rückenlehne eine bestimmte Position erreicht und die entsprechende Einstelltaste gedrückt wird verändert sich die Position nicht mehr und es ertönt ein kontinuierlicher „Piep, Piep“-Ton.
Lösung	Aufgrund der Produktkonstruktion und ergonomischer Anforderungen verfügt dieses Produkt über eine Schutzvorrichtung, die die Einstellung der Sitzposition begrenzt. Gleichzeitig ertönt ein Warnton, wenn die Grenze erreicht ist.

Fehler	Die Funktion funktioniert nicht oder einige Funktionen funktionieren nach dem Einschalten des Geräts nicht.
Lösung	Nachdem das Gerät durch Drücken der Einschalttaste eingeschaltet wurde, muss manuell ein automatisches Massageprogramm oder ein anderer Betriebsmodus ausgewählt werden. Wenn dies nicht geschieht, schaltet sich das Gerät nach 20 Minuten aus. Wenn der manuelle Betriebsmodus ausgewählt ist, sind die nicht ausgewählten Funktionen möglicherweise deaktiviert, und der Betriebsmodus muss im manuellen Modus manuell eingestellt werden.

Fehler	Das Gerät gibt beim Einstellen der Sitzposition ein Geräusch von sich, das an das Reiben von Leder erinnert.
Lösung	Dieses Produkt verwendet hochwertiges, korrosionsbeständiges Leder, das den Umweltschutzanforderungen entspricht. Aufgrund der natürlichen Eigenschaften von Ledermaterialien kommt es bei der Relativbewegung zu einem leichten Reibgeräusch, was ein normales Phänomen ist. Hinweis: Wenn Sie während des Betriebs der Maschine ein Geräusch hören, das an das Reißen von Stoff oder Leder erinnert, stellen Sie den Betrieb bitte sofort ein und lassen Sie das Gerät von einem Fachmann warten.

Fehler	Das Massagerad erreicht die Schultern oder den Nacken nicht.
Lösung	Wenn der Kopf das Kopfpolster nicht berührt oder der Rücken die Rückenlehne nicht berührt, kann die Schulterposition während der Erkennung der Körperform niedriger sein als die tatsächliche Position. Setzen Sie sich in die tiefste Position des Sitzes, legen Sie den Kopf an die Kopfstütze an und beginnen Sie von vorne.

Fehler	Das Gerät ist beschädigt. Das Netzkabel oder der Netzstecker ist ungewöhnlich heiß.
Lösung	Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst.

Bei Fragen oder Unklarheiten zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an das zuständige Servicepersonal.

Produktspezifikation

Modellname: IREST EASYQ

Symbol: IG1050

Bezeichnung: Massagesessel

Nennspannung: 220–240 V~ 50 Hz/60 Hz

Nennleistung: 90 W

Nennbetriebsdauer: 20 min

Sicherheitsklasse: Klasse I